



Nieuwe PCR afnameset (eSwab) voor SOA aanvragen

ALGEMENE INSTRUCTIE:

- neem met bijgeleverde wattenstok (swab) het benodigde patiëntenmateriaal af
- gebruik de afnameset met rose dop voor vrouwen (cervix/vagina)
- gebruik de afnameset met oranje dop voor mannen (urethra)
- vul in op buis; naam, geboortedatum, patiëntnummer en soort materiaal
- stuur de buis na afname z.s.m. naar het laboratorium.
- evt. per post in het voor het laboratorium bestemde verzendmateriaal

AFNAME INSTRUCTIE:

CERVIX (rose dop!):

- verwijder overtollige mucus en/of pus van de exocervix met een dikke wattenstok (verkrijgbaar op ons laboratorium). Gooi deze weg.
- breng de dunne swab in het cervixkanaal tot de punt van de swab niet meer zichtbaar is
- om een goede afname te verzekeren moet de swab 15-30 sec geroteerd worden tegen de cervicale wand
- trek de swab voorzichtig terug zonder de vaginawand te raken
- spoel de swab door deze een paar maal door het medium te halen in bijgeleverde buis
- gooi de swab daarna weg
- sluit het buisje met de rose dop

VAGINA (rose dop!):

N.B.: aanwezigheid van veel mucus/pus kan het resultaat van de test beïnvloeden.

- spreid met één hand de schaamlippen zodat de vagina toegankelijk is.
- breng de wattenstok 2-5 cm in de vagina en draai hem 10-15 seconden rond, strijkend langs de vaginawanden
- spoel de swab door deze een paar maal door het medium te halen in bijgeleverde buis
- gooi de swab daarna weg
- sluit het buisje met de rose dop

URETHRA (oranje dop!):

De patient mag minstens 1 uur voor afname niet geplast hebben!

- breng de bijgeleverde swab (wattenstok) 2 tot 4 cm. in de urethra
- draai de swab voorzichtig 2-5 sec. rond met voldoende druk om de swab in contact te brengen met alle urethra oppervlakken
- spoel de swab door deze een paar maal door het medium te halen in bijgeleverde buis
- gooi de swab daarna weg
- sluit het buisje met de oranje dop

URINE:

Gebruik hiervoor een 20ml steriele universeel container

Voor vragen en opmerkingen kunt U contact opnemen met ons laboratorium:

MaasstadLab Medische Microbiologie

Maasstadweg 21

3079 DZ Rotterdam

tel. 010-2911475

@nnet: naar afdelingen / de organisatie in > afdelingen > MaasstadLab > Medische Microbiologie >

Inzenden van materialen > Genitaliën GO / Chlamydia onderzoek en/of

Trichomonas onderzoek

Website: www.maasstadziekenhuis.nl > een specialisme raadplegen > Laboratoria > MaasstadLab >

Medische Microbiologie > Inzenden van materialen > Genitaliën GO / Chlamydia onderzoek en/of

Trichomonas onderzoek